



PRODUKTKATALOG

# ZAHNERSATZ IM ÜBERBLICK

FÜR ZAHNARZTPRAXEN UND PATIENTEN

**Verständlich erklärt. Individuell gefertigt.**

Eine hochwertige Beratungshilfe für Zahnarztpraxen.

---

[www.topteeth.de](http://www.topteeth.de)

## ÜBER TOP TEETH

# Zahntechnik mit persönlicher Betreuung

Für planbare Abläufe und individuell gefertigten Zahnersatz

Top Teeth unterstützt Zahnarztpraxen bei der Umsetzung hochwertiger zahntechnischer Versorgung. Von der Auftragsannahme bis zur Auslieferung steht eine feste Ansprechperson zur Verfügung. Gefertigt wird in spezialisierten Partnerlaboren nach den Vorgaben der behandelnden Praxis.

Dieser Katalog zeigt eine Auswahl häufig eingesetzter Zahnersatzversorgungen. Die Fotos dienen als Anschauungsbeispiele: Form, Farbe und konstruktive Details werden bei jeder Arbeit individuell auf die Mundsituation abgestimmt.

## Die wichtigsten Versorgung auf einen Blick

01 Kronen und Brücken

4–11

02 Inlays, Onlays und Veneers

12–13

03 Teleskopprothesen

14

04 Modellgussprothese

15

05 Totalprothese

16

06 Implantatgetragener Zahnersatz

17–19

07 Interimsversorgungen

20–22

# 01

## Kronen und Brücken

---

Kronen kommen bei umfangreichen Verlust der Zahnhartsubstanz von einzelnen Zähnen zum Einsatz. Brücken schließen eine Zahnlücke mithilfe benachbarter Zähne oder Implantate. Material und Ausführung beeinflussen Ästhetik, Stabilität, Platzbedarf und Kosten.

- **Vollzirkon**
- **Hochtransluzentes Zirkon (HT-Zirkon)**
- **Keramisch verblendetes Zirkon**
- **IPS E.max® (Lithiumdisilikat)**
- **Metallkeramik, vollverblendet**
- **Metallkeramik, vestibulär verblendet**
- **Vollguss**

*Die konkrete Auswahl erfolgt immer nach Untersuchung und Beratung durch die behandelnde Zahnarztpraxis.*

KRONEN UND BRÜCKEN

# Vollzirkon

Stabil, metallfrei und zahnfarben



Vollzirkonkronen und -brücken werden monolithisch, also aus einem kompakten Zirkonoxidkörper, gefertigt. Die Zahnform wird digital konstruiert und anschließend aus einem Zirkonrohling gefräst. Farbe und Oberflächenstruktur werden durch Einfärben, Bemalen und Glasieren individualisiert.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Hohe Belastbarkeit
- ✓ Zahnfarbene Grundgestaltung
- ✓ Metallfreie Versorgung
- ✓ Kein Abplatzen (Chipping) bei monolithischer Ausführung

### TIPISCH GEEIGNET FÜR

Vor allem Seitenzahnkronen und belastete Bereiche; je nach Material und Fall auch Brücken

### MATERIAL / AUFBAU

Monolithisches Zirkonoxid, bemalt und glasiert

### WICHTIG ZU WISSEN

Materialwahl, Mindeststärken und Eignung für eine Brücke richten sich nach Spannweite, Platzangebot und Belastung.

KRONEN UND BRÜCKEN

# HT-Zirkon

Mehr Lichtdurchlässigkeit für eine natürliche Wirkung



Hochtransluzentes Zirkon ist eine lichtdurchlässigere Variante von Zirkonoxid. Dadurch kann die Versorgung lebendiger und natürlicher wirken als klassisches, stärker opakes Zirkon. Gleichzeitig bleibt sie metallfrei und für viele Kronen- und kleinere Brückensituationen ausreichend stabil.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Natürlichere Lichtwirkung
- ✓ Metallfrei
- ✓ Gute Verbindung von Ästhetik und Stabilität

### TYPISCH GEEIGNET FÜR

Ästhetisch hohen Anspruch im Frontzahnbereich

### MATERIAL / AUFBAU

Hochtransluzentes, mehrschichtig aufgebautes Zirkonoxid

### WICHTIG ZU WISSEN

Mit zunehmender Transluzenz kann die Festigkeit geringer sein als bei besonders hochfestem Zirkon.

KRONEN UND BRÜCKEN

# Keramisch verblendetes Zirkon

Individuelle Schichtung auf stabilem Gerüst



Bei dieser Ausführung bildet Zirkonoxid das stabile, metallfreie Gerüst. Darauf trägt die Zahntechnikerin oder der Zahntechniker keramische Massen in mehreren Schichten auf. So lassen sich Farbverläufe, Transparenz und kleine Charakterisierungen besonders individuell gestalten.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Metallfreies Gerüst
- ✓ Natürliche Farb- und Lichtwirkung
- ✓ Hoher Gestaltungsspielraum
- ✓ Besonders individuelle Frontzahngestaltung möglich

### TYPISCH GEEIGNET FÜR

Ästhetisch anspruchsvolle Kronen und Brücken, besonders im sichtbaren Bereich

### MATERIAL / AUFBAU

Zirkonoxidgerüst mit keramischer Verblendung


### WICHTIG ZU WISSEN

Wie bei jeder verblendeten Versorgung kann die Verblendkeramik bei ungünstiger Belastung beschädigt werden. Konstruktion und Okklusion sind entscheidend.

## KRONEN UND BRÜCKEN

# IPS e.max® (Lithiumdisilikat)

Feine Ästhetik für sichtbare Bereiche

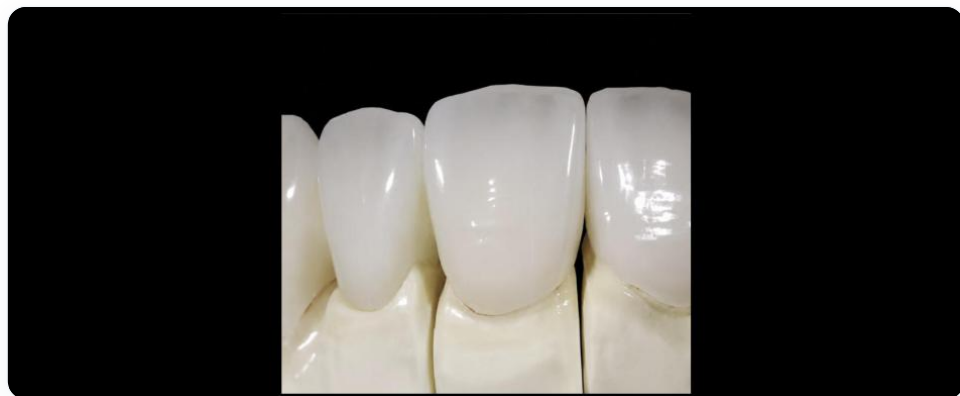

IPS e.max® / Lithiumdisilikat ist eine hochfeste Glaskeramik mit sehr guten lichtoptischen Eigenschaften. Sie kann Farbe und Transluzenz natürlicher Zahnschubstanz besonders fein nachbilden. Unter dem bekannten Systemnamen IPS e.max® wird das Material für unterschiedliche vollkeramische Restaurationen angeboten.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Sehr natürliche Lichtwirkung
- ✓ Feine Farbanpassung möglich
- ✓ Metallfrei
- ✓ Auch für substanzschonende Teilrestaurationen geeignet

|                             |                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TYPISCH GEEIGNET FÜR</b> | Veneers, Inlays, Onlays, Teilkronen und Einzelkronen; ausgewählte kurze Brücken nur nach Materialfreigabe                 |
| <b>MATERIAL / AUFBAU</b>    | Lithiumdisilikat-Glaskeramik                                                                                              |
| <b>WICHTIG ZU WISSEN</b>    | Die Eignung hängt von Präparation und Beanspruchung ab. Nicht geeignet für größere Spannen oder bei Bruxismus (Knirschen) |

## KRONEN UND BRÜCKEN

# Metallkeramik auf NEM

Bewährter Aufbau mit zahnfarbener Verblendung



Metallkeramik verbindet ein stabiles Gerüst aus einer Nichtedelmetall-Legierung (NEM) mit einer zahnfarbenen keramischen Verblendung. Das Metall sorgt für Stabilität; die Keramik gestaltet die sichtbare Zahnform und Farbe. Die Technik ist seit vielen Jahren etabliert und vielseitig einsetzbar.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Bewährte Versorgungsform
- ✓ Für Kronen und viele Brückensituationen geeignet
- ✓ Hohe Gerüststabilität
- ✓ Zahnfarbene Verblendung der sichtbaren Flächen

### TYPISCH GEEIGNET FÜR

Einzelkronen, kurze und größere Brücken – abhängig von Konstruktion und Pfeilersituation

### MATERIAL / AUFBAU

NEM-Gerüst mit keramischer Verblendung

### WICHTIG ZU WISSEN

Das Metallgerüst ist nicht lichtdurchlässig. Bei Zahnfleischrückgang kann am Rand gegebenenfalls ein dunkler Saum sichtbar werden.

KRONEN UND BRÜCKEN

# Vestibulär verblendete Metallkeramik

Zahnfarben im sichtbaren Bereich



Bei der vestibulären Verblendung wird die nach außen sichtbare Fläche zahnfarben gestaltet. Diese Ausführung ist Bestandteil der Regelversorgung\* und verbindet eine zweckmäßige Konstruktion mit einer Verblendung im sichtbaren Bereich.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Zahnfarbene Gestaltung auf der sichtbaren Außenseite
- ✓ Wirtschaftliche, zweckmäßige Versorgung
- ✓ Stabiles Metallgerüst
- ✓ Ausführung nach Befund und geltenden Kassenrichtlinien

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPISCH GEEIGNET FÜR | Kronen und Brücken innerhalb der jeweils vorgesehenen Verblendbereiche                                                                                        |
| MATERIAL / AUFBAU    | NEM-Gerüst mit keramischer Teilverblendung                                                                                                                    |
| WICHTIG ZU WISSEN    | Welche Flächen verblendet werden und ob die Versorgung der Regelversorgung entspricht, ergibt sich aus Befund, Zahnregion und aktuellem Heil- und Kostenplan. |

\* Oberkiefer 15-25, Unterkiefer 34-44

KRONEN UND BRÜCKEN

# Vollguss

Funktional, stabil und wirtschaftlich



Vollgusskronen und metallische Brückenglieder bestehen vollständig aus einer Nichtedelmetall-Legierung. Sie sind nicht zahnfarben, benötigen je nach Situation jedoch vergleichsweise wenig Platz und bieten eine robuste, funktionale Lösung. Sie stellen im Seitenzahnbereich die Regelversorgung dar.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Hohe Stabilität
- ✓ Bewährte und wirtschaftliche Versorgung
- ✓ Geringerer Platzbedarf möglich
- ✓ Langlebig

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPISCH GEEIGNET FÜR | Vor allem wenig sichtbare Seitenzahnbereiche und Situationen mit begrenztem Platzangebot         |
| MATERIAL / AUFBAU    | Nichtedelmetall-Legierung (NEM), unverblendet                                                    |
| WICHTIG ZU WISSEN    | Die Versorgung bleibt metallfarben. Nicht geeignet bei Metallallergien oder Unverträglichkeiten. |

## KRONEN UND BRÜCKEN

# Materialien im Vergleich

Eine schnelle Orientierung für das Beratungsgespräch

| VERSORGUNG                    | STABILITÄT       | ÄSTHETIK  | AUFBAU       | TYPISCHER FOKUS               |
|-------------------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------------------|
| <b>Vollzirkon</b>             | sehr hoch        | hoch      | metallfrei   | ganzer Kiefer                 |
| <b>HT-Zirkon</b>              | mittel bis hoch* | sehr hoch | metallfrei   | Einzelzahn                    |
| <b>Verblendetes Zirkon</b>    | mittel bis hoch  | Sehr hoch | metallfrei   | sichtbarer Bereich            |
| <b>E.max Lithiumdisilikat</b> | mittel bis hoch* | sehr hoch | metallfrei   | Einzelzahn / Teilrestauration |
| <b>Metallkeramik NEM</b>      | hoch             | hoch      | Metallgerüst | ganzer Kiefer                 |
| <b>Vollguss NEM</b>           | sehr hoch        | gering    | Metall       | wenig sichtbare Bereiche      |

\* Die Eigenschaften unterscheiden sich je nach konkretem Werkstoff, Produktvariante und Konstruktion. Die Tabelle ist eine vereinfachte Orientierung und ersetzt keine individuelle Materialentscheidung.

Nicht ein einzelnes Material ist grundsätzlich „das beste“. Entscheidend ist, welche Kombination aus Ästhetik, Belastbarkeit, Platzangebot, Befestigung und Wirtschaftlichkeit für die jeweilige Situation sinnvoll ist. Bei Unsicherheit zur passenden Versorgung steht Ihnen Ihr Zahnarzt gemeinsam mit Ihrem Ansprechpartner von Top Teeth jederzeit zur Verfügung.

INLAYS, ONLAYS UND VENEERS

# Inlays und Onlays

## Passgenaue Teilrestorationen



Diese vollkeramischen Restaurationen ersetzen gezielt einzelne Bereiche eines Zahnes oder verändern seine sichtbare Form. Im Vergleich zu einer vollständigen Krone kann – wenn die klinische Situation es erlaubt – mehr natürliche Zahnschubstanz erhalten bleiben. Inlays ersetzen Anteile innerhalb der Kaufläche. Onlays beziehen zusätzlich einen oder mehrere Zahnhöcker ein. Beide werden außerhalb des Mundes individuell gefertigt und anschließend in der Praxis befestigt. Vollkeramische Varianten lassen sich farblich sehr gut an den Zahn anpassen.

### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Erhalt nicht geschädigter Zahnschubstanz möglich
- ✓ Zahnfarbene Gestaltung
- ✓ Hohe Ästhetik
- ✓ Stabile Alternative zu einer direkten Füllung bei größeren Defekten

#### TYPISCH GEEIGNET FÜR

Größere Defekte im Seitenzahnbereich, wenn ausreichend tragfähige Zahnschubstanz vorhanden ist

#### MATERIAL / AUFBAU

Häufig IPS E.max® Lithiumdisilikat

#### WICHTIG ZU WISSEN

Ob Inlay, Onlay, Teilkkrone oder Krone sinnvoll ist, hängt von Defektgröße, Restzahnsubstanz und Kaubelastung ab.

INLAYS, ONLAYS UND VENEERS

# Veneers

Dünne Keramikschalen für die sichtbare Zahnfläche



Veneers sind individuell gefertigte, dünne Verblendschalen, die auf der sichtbaren Vorderfläche eines Zahnes befestigt werden. Sie können Form, Farbe und kleinere Stellungskorrekturen harmonisieren. Je nach Ausgangssituation ist eine geringe Präparation notwendig.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Sehr natürliche Lichtwirkung
- ✓ Häufig substanzschonender als eine Vollkrone
- ✓ Individuelle Form- und Farbgestaltung
- ✓ Langfristig farbstabile Keramikoberfläche

### TYPISCH GEEIGNET FÜR

Ausgewählte ästhetische Korrekturen im Frontzahnbereich

### MATERIAL / AUFBAU

Meist E.max Lithiumdisilikat-Glaskeramik oder geschichtete Keramik

### WICHTIG ZU WISSEN

Veneers sind nicht für jede Fehlstellung, Verfärbung oder Bissituation geeignet.

TELESKOPPROTHESEN

# Teleskopprothese

Fester Halt – zur Reinigung herausnehmbar



Eine Teleskopprothese wird über Doppelkronen an vorhandenen Zähnen oder geeigneten Implantaten gehalten. Sie verbindet sicheren Halt mit der Möglichkeit, die Prothese zur Reinigung herauszunehmen und später bei Zahnverlust anzupassen.

Die beschliffenen Pfeilerzähne erhalten fest zementierte Primärkronen. Passende Sekundärkronen sind in die herausnehmbare Prothese eingearbeitet. Beim Einsetzen gleiten beide Teile präzise ineinander und sorgen durch ihre Passung für Halt.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Guter Halt ohne sichtbare Klammern
- ✓ Günstige Kraftverteilung auf mehrere Pfeiler
- ✓ Zur Reinigung herausnehmbar
- ✓ Bei veränderter Zahnsituation häufig erweiterbar

|                             |                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TYPISCH GEEIGNET FÜR</b> | Reduzierter Restzahnbestand und Situationen, in denen festsitzender Zahnersatz nicht indiziert oder nicht gewünscht ist               |
| <b>MATERIAL / AUFBAU</b>    | Doppelkronen, Metallgerüst und zahnfarbener Prothesenkunststoff; Ausführung nach Planung                                              |
| <b>WICHTIG ZU WISSEN</b>    | Pfeilerzähne, Passung und Prothesenlager müssen regelmäßig kontrolliert werden. Sorgfältige tägliche Reinigung ist besonders wichtig. |


MODELLGUSSPROTHESE

# Modellgussprothese

Stabiles Gerüst für größere Zahnlücken



Modellguss mit Co/Cr-Gerüst

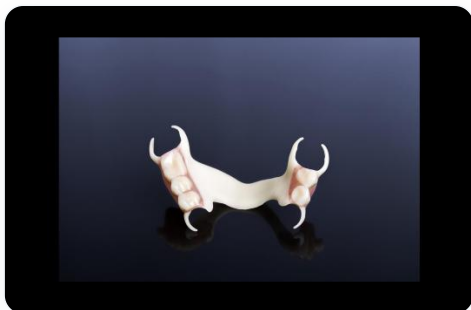

Modellguss mit PEEK-Gerüst

Eine Modellgussprothese besitzt ein individuell gefertigtes Gerüst. Dieses kann aus Co/Cr, Titan oder PEEK gefertigt werden. Klammern und Auflagen verankern die Prothese an vorhandenen Zähnen und verteilen Kaukräfte. Die fehlenden Zähne werden mit zahnfarbenen Prothesenzähnen auf einer Kunststoffbasis ersetzt.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Stabile, vergleichsweise schlanke Konstruktion
- ✓ Zur Reinigung herausnehmbar
- ✓ Definierte Abstützung an vorhandenen Zähnen
- ✓ Bei geeigneter Planung häufig erweiterbar

|                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPISCH GEEIGNET FÜR | Größere Lücken bei noch vorhandenen, ausreichend belastbaren Zähnen                                                               |
| MATERIAL / AUFBAU    | Gerüst aus Co/Cr, Titan oder PEEK, Kunststoffbasis und Prothesenzähne                                                             |
| WICHTIG ZU WISSEN    | Klammern können je nach Position sichtbar sein. Pfeilerzähne und Prothese benötigen regelmäßige Kontrolle und sorgfältige Pflege. |

TOTALPROTHESE

# Totalprothese

Versorgung eines vollständig zahnlosen Kiefers



Eine Totalprothese ersetzt alle Zähne eines Kiefers. Sie liegt auf der Schleimhaut des Kieferkamms auf. Im Oberkiefer kann ein flächiger Saugeffekt den Halt unterstützen; im Unterkiefer ist die Stabilität wegen der kleineren Auflagefläche und der Zungenbewegung häufig anspruchsvoller.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Wiederherstellung von Zahnreihe und Lippenstütze
- ✓ Individuelle Zahnform und Zahnfarbe
- ✓ Unterstützung von Kauen und Aussprache
- ✓ Zur Reinigung herausnehmbar

|                             |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TYPISCH GEEIGNET FÜR</b> | Vollständig zahnloser Ober- oder Unterkiefer                                                                                                                       |
| <b>MATERIAL / AUFBAU</b>    | Zahnfleischfarbener Prothesenkunststoff mit individuell aufgestellten Prothesenzähnen                                                                              |
| <b>WICHTIG ZU WISSEN</b>    | Kieferknochen und Schleimhaut verändern sich im Laufe der Zeit. Druckstellen, nachlassender Halt oder Bissveränderungen sollten in der Praxis kontrolliert werden. |

# 06

## Implantatgetragener Zahnersatz

---

Implantate können einzelne Kronen, Brücken oder herausnehmbare Prothesen tragen. Die Verbindung mit dem Kieferknochen ermöglicht Lösungen, die unabhängig von natürlichen Nachbarzähnen geplant werden können.

- **Implantatkrone**
- **Implantatbrücke**
- **Implantatgetragene Prothesen**

*Die konkrete Auswahl erfolgt immer nach Untersuchung und Beratung durch die behandelnde Zahnarztpraxis.*

IMPLANTATGETRAGENER ZAHNERSATZ

# Implantatkrone und Implantatbrücke

## Festsitzender Zahnersatz auf Implantaten



Eine Implantatkrone ersetzt einen einzelnen fehlenden Zahn. Sie wird über ein Verbindungselement, das Abutment, mit dem Implantat verbunden. Je nach System und Planung kann die Krone verschraubt oder zementiert werden.

Eine Implantatbrücke ersetzt mehrere benachbarte Zähne und wird von zwei oder mehr Implantaten getragen. Dadurch müssen natürliche Nachbarzähne nicht zwingend als Brückenpfeiler beschliffen werden.

### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Festsitzende Versorgung
- ✓ Unterschiedliche Materialien und Abutments möglich
- ✓ Verschraubte oder zementierte Ausführung je nach Planung
- ✓ Individuelle zahnfarbene Gestaltung
- ✓ Für alle gängigen Implantatsysteme geeignet

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TYPISCH GEEIGNET FÜR</b> | Einzelzahnlücken oder größere begrenzte Lücken bei geeigneten Knochen- und Gewebeverhältnissen                                            |
| <b>MATERIAL / AUFBAU</b>    | Je nach Fall Zirkonoxid, Lithiumdisilikat oder Metallkeramik; Abutment und Schraube systemspezifisch                                      |
| <b>WICHTIG ZU WISSEN</b>    | Implantatsystem, Emergenzprofil, Hygienefähigkeit, Bissbelastung und prothetischer Platz müssen vor der Fertigung eindeutig geplant sein. |

— IMPLANTATGETRAGENER ZAHNERSATZ

# Implantatgetragene Prothesen

Mehr Halt für herausnehmbaren Zahnersatz



Implantate können eine herausnehmbare Prothese über unterschiedliche Halteelemente stabilisieren. Dazu gehören beispielsweise die Verankerung über Teleskope oder Stegkonstruktionen. Die Prothese lässt sich zur Reinigung herausnehmen, sitzt im Alltag aber kontrollierter als eine rein schleimhautgetragene Versorgung.

— VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Verbesserter Halt und höhere Stabilität
- ✓ Verschiedene Halte- und Verbindungssysteme verfügbar
- ✓ Je nach Konzept schlankere Gestaltung möglich
- ✓ Für alle gängigen Implantatsysteme geeignet
- ✓ Zur Reinigung herausnehmbar

|                             |                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TYPISCH GEEIGNET FÜR</b> | Zahnlose oder stark reduzierte Kiefer, wenn zusätzlicher Prothesenhalt benötigt wird                                                    |
| <b>MATERIAL / AUFBAU</b>    | Prothese mit Metallverstärkung oder Gerüst; Halteelemente passend zum Implantatsystem und Versorgungskonzept                            |
| <b>WICHTIG ZU WISSEN</b>    | Auch implantatgetragene Prothesen brauchen tägliche Pflege und regelmäßige Kontrollen. Halteelemente können mit der Zeit verschleießen. |

## KAPITEL 07

# 07

# Interimsversorgungen

---

Interimsprothesen schließen Zahnlücken für eine begrenzte Zeit – etwa während einer Heilungsphase oder bis zur endgültigen Versorgung. Sie stellen Aussehen und grundlegende Kaufunktion vorübergehend wieder her.

- **Klammerprothese aus Kunststoff**

- **Flexible Valplast-Prothese**

*Die konkrete Auswahl erfolgt immer nach Untersuchung und Beratung durch die behandelnde Zahnarztpraxis.*

INTERIMSVERSORGUNGEN

# Klammerprothese aus Kunststoff

## Die klassische Übergangslösung



Die Kunststoff-Klammerprothese ersetzt fehlende Zähne auf einer zahnfleischfarbenen Basis. Gebogene Metallklammern halten sie an vorhandenen Zähnen. Sie lässt sich vergleichsweise schnell herstellen und bei Bedarf häufig anpassen oder erweitern.

### VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Kurze Herstellungszeit
- ✓ Herausnehmbar und gut zugänglich für die Reinigung
- ✓ Wirtschaftliche Übergangsversorgung
- ✓ Bei Veränderungen anpassbar

|                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIPISCH GEEIGNET FÜR</b> | Vorübergehender Lückenschluss, zum Beispiel nach Zahntentfernung oder während einer Behandlungs- und Heilungsphase                                 |
| <b>MATERIAL / AUFBAU</b>    | Prothesenkunststoff mit konfektionierten Zähnen und gebogenen Metallklammern                                                                       |
| <b>WICHTIG ZU WISSEN</b>    | Eine Interimsprothese ist in der Regel nicht als dauerhafte Versorgung gedacht. Halt, Druckstellen und Heilungsverlauf müssen kontrolliert werden. |

INTERIMSVERSORGUNGEN

# Flexible Valplast® -Prothese

Leicht, flexibel und ohne klassische Metallklammern



Valplast® -Prothesen werden aus einem thermoplastischen Kunststoff gefertigt. Zahnfarbene beziehungsweise zahnfleischfarbene Halteelemente können weniger auffällig wirken als Metallklammern. Valplast ist leicht und elastisch; Einsatzgebiet und Reparaturmöglichkeiten unterscheiden sich jedoch von klassischen Kunststoff- oder Modellgussprothesen.

## VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ✓ Metallfreie Halteelemente möglich
- ✓ Leichtes und flexibles Tragegefühl
- ✓ Unauffällige, zahnfleischfarbene Gestaltung
- ✓ Für ausgewählte Übergangs- und kleinere Versorgungssituationen

|                      |                                                                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TYPISCH GEEIGNET FÜR | Ausgewählte kleinere Lücken und Interimsversorgungen nach Prüfung durch die Praxis                                                                               |
| MATERIAL / AUFBAU    | Flexibler thermoplastischer Prothesenkunststoff                                                                                                                  |
| WICHTIG ZU WISSEN    | Nicht jede Biss- oder Restzahnsituation ist geeignet. Unterfütterung, Reparatur und Erweiterung können eingeschränkt sein. Valplast® ist eine Markenbezeichnung. |





# Persönliche Ansprechpartner. Individuelle Zahntechnik.

---



TELEFON

**0800 589 2801**



E-MAIL

**info@topteeth.de**



WEB

**www.topteeth.de**



**topteeth.de**

---

Abbildungen zeigen individuelle Beispielarbeiten.  
Form, Farbe und Ausführung werden fallbezogen geplant.

**Stand: Juli 2026**